


Korkean riskin painehaavapatjat, Hyper Foam 2 Greenline ja Evaq Pro II Greenline

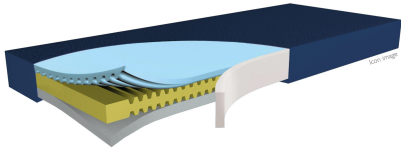

Korkean riskin painehaavapatjat, Hyper Foam 2 Greenline ja Evaq Pro II Greenline GRHF2CL / GREVAII

Uudistuneet hygieniapatja Hyper Foam 2 Greenline ja pelastuspatja Evaq Pro II Greenline ovat korkean painehaavariskiluokan vaahtomuovipatjoja. Uudessa Greenline-mallistossa käytetään EcoLast vaahtomuovia, jonka valmistuksessa on pystytty vähentämään noin 22 % hiilidioksidipäästöjä verrattaessa perinteisiin vaahtomuovipatjoihin. Lisäksi patjan solukennorakenne on perinteistä materiaalia avoimempi, jolloin patjan rakenne säilyy tasaisena ilmankosteudesta tai lämpötilasta riippumatta ja kosteus haihtuu nopeammin. Patjat on tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka viettävät lepoasennossa suurimman osan päivästä, tai jotka ovat erittäin kipuherkkiä. On kuitenkin huomioitava, että laadukas makuualusta ei poista asennonvaihteluiden merkitystä painehaavojen ennaltaehkäisyssä.

Korkealaatuinen EcoLast -vaahtomuovi tasaa erinomaisesti kehoon kohdistuvaa pintapainetta ja vaahtomuovin kimmoisa avosolurakenne helpottaa omatoimisia ja avustettuja siirtymisiä sängyssä. Molemmiin puoliin patjan sivuilla kulkevat 5 cm:ä leveät reunapalkit tuovat käyttäjälle lisätukea sängyn reunalla istuttaessa. Patja koostuu kolmesta vaahtomuovikerroksesta. Kerrosten välinen ristiin kulkeva uritus parantaa patjan ilmastointia ja vähentää hikoilua. Hyper Foam 2 Greenline patjan hygieniapäällinen on neljään suuntaan joustavaa, nesteitä läpäisemätöntä PU-materiaalia, joka päästää kuitenkin vesihöyryn lävitseen mahdollistaen patjan ilmastoitumisen. Päällisen erinomainen joustavuus vähentää ihoon kohdistuvaa hankausta, esimerkiksi asennon vaihtamisen aikana tai sähkötoimisen sängyn säätöjä käytettäessä. Päällisen saumat on kuumasaamatut, tippasuojattu vetoketju aukeaa patjan kolmelle sivulle. Myös Evaq Pro II Greenline patjan päällisen päälliosa on hygieniamateriaalia. Päällisen pohjaosa on erittäin hyvin pelastustilanteessa lattiaa pitkin liukuvaa, kestävä kangasta. Päällisessä on 8 otekahvaa ja kaksi muovilukolla käyttäjän vartalon ympärille kiinnitettävää vyötä. Koko patja on mahdollista autoklaavata (105 °C). Patjan päällinen voidaan konepestä (95 °C) ja desinfioida pyyhkimällä (yleisesti käytössä olevilla desinfektioaineilla). Päällinen on paloturvallinen (SL1). Käyttäjän suosituspaino:

Patja Hyper Foam 2 Greenline: 20-150 kg

Patja EVAQ Pro II Greenline: 20-150 kg Patjan takuu on 7 vuotta, koskien valmistusvirheitä. Säilytys käyttöönoton jälkeen vaakatasossa (ei rullalla).

Tuotteen voi myös vuokrata osana vuokrasänkypakettia. Katso lisää:

Vuokrasänkypaketit

Valmistaja:
FunkeMedical

Nimike	Patja (leveys x pituus x paksuus)	Päällinen	Toimitusaika tilauksesta
GRHF2CL080180	Patja Hyper Foam 2 Greenline 80x180x15 cm	hygieniapäällinen	5 viikkoa
GRHF2CL080200	Patja Hyper Foam 2 Greenline 80x200x15 cm	hygieniapäällinen	3 työpäivää

GRHF2CL080220	Patja Hyper Foam 2 Greenline 80x220x15 cm	hygieniapäällinen	5 viikkoa
GRHF2CL090200	Patja Hyper Foam 2 Greenline 90x200x15 cm	hygieniapäällinen	3 työpäivää
GRHF2CL090220	Patja Hyper Foam 2 Greenline 90x220x15 cm	hygieniapäällinen	5 viikkoa
GRHF2CL100200	Patja Hyper Foam 2 Greenline 100x200x15 cm	hygieniapäällinen	5 viikkoa
GREVAII080200	Patja EVAQ Pro II Greenline 80x200x15 cm	evakuointipäällinen	3 työpäivää
GREVAII090200	Patja EVAQ Pro II Greenline 90x200x15 cm	evakuointipäällinen	3 työpäivää
GREVAII100200	Patja EVAQ Pro II Greenline 100x200x15 cm	evakuointipäällinen	5 viikkoa