

Otetikas nauha Alpha



Otetikas nauha Alpha

PM-6090

Otetikas nauha Alpha on monipuolinen apuväline omatoimisen siirtymisen tukemiseen. Otetikas nauha tarjoaa hyvän otteen ja mahdollisuuden hyödyntää käsivoimia siirtymisissä, kuten makuulta istumaan nousemisessa istumasta makuulle käymisessä istuimen ja vuoteen välisissä matalissa siirtymisissä. Otenauha voidaan kiinnittää vuoteen jalkopäädyn runkoon kiinnityslenkin avulla. Tuotteessa on 8 kahvaa, joiden avulla henkilö voi kahva kerrallaan kohottaa istuma-asentoon sängyssä. Otenauha Alpha voidaan hyödyntää myös liukulautasiirroissa kahdella tavalla. Avustaja voi kiinnittää otenauhan siirtovyön kahvaan ja avustaa näin liukumista otenauhasta vetämällä. Otenauha voi toimia apuna myös siirtyjälle itselleen. Pyörätuolista vuoteeseen siirryttäessä sängyn jalkopäähän kiinnitetty otetikas nauha tarjoaa siirtyjälle mahdollisuuden hyödyntää käsivoimia ja vetää itseään liukulautaa pitkin kohti sänkyä. Otenauhassa kulkee kahvoja molemmin puolin nauhaa. Vahvistetut, pyöreäpintaiset kahvat tarjoavat pitävän otteen. Otetikas nauha Alpha on helppokäyttöinen ja siirrettävissä helposti paikasta toiseen. Vahvan Nylon-materiaalin ja pitävien ompeluiden ansiosta sen maksimikäyttäjän paino on 200 kg.

Hinta 74,12 € (alv 0%) / 93,03 € (alv 25.5%)

Valmistaja:

Petermann Medical

Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.