

Kahvallinen siirtoalusta Alpha



Kahvallinen siirtoalusta Alpha

PM-4016

Siirtoalusta Alpha soveltuu apuvälineeksi esimerkiksi seuraaviin siirtotilanteisiin makuuasennossa tasolta toiselle siirtämiseen makuuasennossa siirtämiseen sivu- tai ylä-ala-suunnassa lattialle kaatuneen henkilön nostamiseen esimerkiksi makuutasolle tai istuimelle. Suosittelemme toisen henkilön nostamista lattialta ylös aina nostolaitteella, jos se suinkin on mahdollista. Mikäli nostolaitteen käyttö ei ole mahdollista, Alpha siirtoalustan kahvat tarjoavat nostajille hyvän ja vakaan otteen ja mahdollistavat ergonomisemman nostotavan. Siirtoalustan käyttö tekee myös avustettavalle nostotilanteesta miellyttävämmän ja turvallisemman, kun tilanteessa ei tarvitse ottaa otetta hänen kainaloistaan, raajoistaan tai vaatteistaan. Alpha siirtoalustassa liukumateriaali on ommeltu kiinni alustan pohjaan. Liukuva pinta vähentää merkittävästi kitkaa siirrettävän henkilön kehon ja alustan väliltä. Liukualustan sivuosat ja sivuille kiinnitetyt kahvat voidaan taistaa helposti alustan alle, joka helpottaa alustan asettamista potilaan vartalon alle kylkimakuuasennon kautta. Liukualustan sisällä olevan taipuisan muovivahvikkeen voi poistaa puhdistuksen ajaksi, näin siirtoalustan puhdistaminen onnistuu pyyhkimisen lisäksi myös 60 asteen konepesussa. Siirtoalustaa on saatavana kahdessa koossa, mittatiedot löytyvät alla olevasta taulukosta.

Valmistaja:

Petermann Medical

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.

Nimike	Kuvaus	Koko (L x P)	Kahvojen lkm	Materiaali	SWL	Hinta, alv 0 %
PM-4012	Siirtoalusta Alpha 4 kahvalla	53 x 110 cm	4	nylon	200 kg	159,90 €
PM-4016	Siirtoalusta Alpha 6 kahvalla	53 x 150 cm	6	nylon	200 kg	235,28 €