

Hoitotuoli Arne



Hoitotuoli Arne

8010408-02

Hoitotuoli Arne tarjoaa mukavan istuma-asennon käyttäjälleen, sekä helpottaa hoitohenkilöstön työskentelyä. Istuma-asentoa voidaan vaihdella monipuolisesti istuinkorkeutta -ja kulmaa säätämällä. Säädöt tapahtuvat hydraulisesti. Korkeussäätöpoljin sijaitsee tuolin sivulla molemmin puolin tuolia ja kahva istuinkulman kallistamiseen sijaitsee selkäosan takana. Hoitotuoli Arne soveltuu käytettäväksi esimerkiksi Istuimena hoivayksiköissä sekä sairaalaosastoilla Istuimena päiväkirurgian yksiköissä tai heräämöissä Hoitotuolina poliklinikakayksiköissä tai päivystyksissä Hoitotuolina syöpähoitoyksiköissä Hoitotoimenpiteitä on helppo suorittaa ergonomisessa työasennossa ja katsekontaktissa potilaan kanssa, kun istuinkorkeus on säädettyä korkeammaksi. Tämä mahdollistaa myös potilaalle yhteyden ympäristöönsä. Istuinkulman kallistaminen taaksepäin mahdollistaa hoitotoimenpiteet monipuolisesti ja taakse kallistunut asento toimii hyvin myös lepoasentona. Istuinkulman kallistaminen eteenpäin helpottaa tuolista jalkeille nousemista. Tyynyjen pehmustemateriaalina on viskoelastinen, kehon painon ja lämmön mukaan muovautuva vaahto, joka tasaa painetta kehon painepisteiden alta eri asennoissa. Potilaan jalat tukeutuvat yhtenäiselle jalkatuelle, joka voidaan työntää siirtymisten ajaksi pois tieltä tuolin rungon alle. Jalkatuki painautuu vasten lattiaa, mikäli käyttäjä epähuomioissa nousee seisomaan jalkatuen ollessa esillä. Tämä lisää tuolin käyttöturvallisuutta, sillä se ei lähde kippaamaan painon siirtyessä jalkatuelle. Siirtymisiä ja hoitotoimenpiteitä helpottavat myös taakse kääntyvät käsituet. Tuolin nelipyöräinen alusta ja suuret, 125 mm halkaisijan pyörät helpottavat tuolin liikuttelua. Pyörien keskuslukitus pitää sen paikoillaan siirtymis- ja hoitotilanteissa. Tuoliin on saatavana monipuolisesti lisävarusteita. Takuuaika: 2 vuotta. Tutustu Arne-hoitotuolin käyttömahdollisuuksiin tämän esittelyvideon avulla: <https://www.youtube.com/watch?v=w5PWyoE8Lbg>

Videolla esiteltävä Bruno on säätömahdollisuuksiltaan Arne-hoitotuolia vastaava, mutta säädöt on toteutettu sähkötoimisesti.

Valmistaja:

Reha Medi Hoffmann GmbH

Pesuhjeet

ph 6-8

Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset tiedot

Istuinkorkeus	45 - 73 cm
Istuileveys (vakio/extraleveä)	50 / 60 cm
Istuinsyvyys	45 cm
Kokonaisleveys (vakio/extraleveä)	60 / 70 cm

Kokonaispituus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)	84 /129,5
Kokonaiskorkeus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)	134 -160 /
Pyörät, keskuslukittavat	ø 125 mm
Potilaan maksimipaino	230 kg