

Hoitotuoli Bruno



Hoitotuoli Bruno

8210000-02

Hoitotuoli Bruno tarjoaa mukavan istuma-asennon käyttäjälleen, sekä helpottaa hoitohenkilöstön työskentelyä. Istuma-asentoa voidaan vaihdella monipuolisesti istuinkorkeutta -ja kulmaa säätämällä. Säädöt tapahtuvat sähkötoimisesti käsiohjaimen painikkeita käyttämällä. Hoitotuoli Bruno soveltuu käytettäväksi esimerkiksi Istuimena hoivayksiköissä sekä sairaalaosastoilla Istuimena päiväkirurgian yksiköissä tai heräämöissä Hoitotuolina poliklinikkayksiköissä tai päivystyksissä Hoitotuolina syöpähoitoyksiköissä Hoitotoimenpiteitä on helppo suorittaa ergonomisessa työasennossa ja katsekontaktissa potilaan kanssa, kun istuinkorkeus on säädettyä korkeammaksi. Tämä mahdollistaa myös potilaalle yhteyden ympäristöönsä. Istuinkulman kallistaminen taaksepäin mahdollistaa hoitotoimenpiteet monipuolisesti ja taakse kallistunut asento toimii hyvin myös lepoasentona. Istuinkulman kallistaminen eteenpäin ja samanaikaisesti korkeuden säätäminen ylöspäin helpottavat tuolista jalkeille nousemista. Tyynyjen pehmustemateriaalina on viskoelastinen, kehon painon ja lämmön mukaan muovautuva vaahto, joka tasaa painetta kehon painepisteiden alta eri asennoissa. Potilaan jalat tukeutuvat yhtenäiselle jalkatuelle, joka voidaan työntää siirtymisten ajaksi pois tieltä tuolin rungon alle. Jalkatuki painautuu vasten lattiaa, mikäli käyttäjä epähuomiossa nousee seisomaan jalkatuen ollessa esillä. Tämä lisää tuolin käyttöturvallisuutta, sillä se ei lähde kippaamaan painon siirtyessä jalkatuelle. Siirtymisiä ja hoitotoimenpiteitä helpottavat myös taakse kääntyvät käsituet. Tuolin nelipyöräinen alusta ja suuret, 125 mm halkaisijan pyörät helpottavat tuolin liikuttelua. Pyörien keskuskukitus pitää sen tukevasti paikoillaan siirtymis- ja hoitotilanteissa. Tuoliin on saatavana monipuolisesti lisävarusteita. Takuuaika: 2 vuotta.

Katso esittelyvideo: Hoitotuoli Bruno

Katso video hoitotuoli Brunon käytöstä:

Valmistaja:

Reha Medi Hoffmann GmbH

Pesuohjeet



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset tiedot

Istuinkorkeus	45 - 73 cm
Istuinleveys (vakio / extraleveä)	50 / 60 cm
Istuinsyvyys	45 cm
Kokonaisleveys (vakio / extraleveä)	60 / 70 cm
Kokonaispituus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)	84 / 129,5 cm

Kokonaiskorkeus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)

134 - 160

Pyörät, keskuslukittavat

Ø 125 mm

Potilaan maksimi paino

230 kg