

# Comfort-pyörätuoli NETTI Adapt Pro



## Comfort-pyörätuoli NETTI Adapt Pro NETTID300..

Uuden sukupolven Comfort-pyörätuoli Netti Adapt Pro, jossa istumisen miellyttävyys on viety täysin uudelle tasolle. Käyttäjä pystyy yksinkertaisesti istumaan tuolissa hyvässä tuetussa asennossa pidempään. Adapt Pro tuolin istuinlevy on suunniteltu ja muotoiltu siten, että se vähentää 20% istuinkyhmyjen alueelle kohdistuvaa huippupainetta ehkäisten painehaavojen syntyä, istuin vähentää myös tuolissa tapahtuvaa liukumista ja minimoi hankauksesta aiheutuvaa kudosten venyttymistä. Tuolissa on myös patentoitu painopisteen säätö istuinkulmaa säädettäessä ja käsitet on kiinnitetty selkäosaan, jolloin käsien asento säilyy optimaalisena huolimatta selkäosan kulmansäädöstä. Selkäosaan on integroituna 10 cm:n jatkopala, joka on tarvittaessa otettavissa käyttöön. Tuoliin on saatavilla erilaisia päätukia, ja asentoa tukevia liivi- ja lantiovyö vaihtoehtoja. Ominaisuuksia: Vakiona Netti Grandis jalkatuet, jotka on erittäin yksinkertaiset säätää ja antavat tuen vakaalle istuma-asennolle Avustajan rumpujarru vakiona Kevyt kelattava, painopisteen säädön ansiosta Kulma- ja korkeussäädettävä työntötanko vakiona Taaksekääntyvät, selkäosan kulman mukaan säätävät käsitet Autokuljetuskiinnikkeet vakiona Tyylikäs rungon muotoilu Tuoli soveltuu käytettäväksi istuimena autokuljetuksen aikana ISO 7176-19 standardin mukaisesti. Puhdistus: kts. tarkemmin liitteenä oleva pesuohje. Adapt Pro tuoteperheen esittelyvideo; Netti\_Adapt\_Pro\_tuoteperhe

### Paino (kg)

53,00

### Valmistaja:

AluRehab

### Pesuohjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.



Voidaan puhdistaa desinfioidulla puhdistusaineella, (esim. 500 ppm kloramiinilla. Huom. huuhtelu!)



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).



Voidaan steriloida höyryautoklaavissa.



Tahrat tulee poistaa heti kostealla sienellä

### Tekniset ominaisuudet

### Netti Adapt Pro

Istuinleveys	35 cm / 38 cm / 40 cm / 43 cm / 45 cm / 50 cm
Kokonaisleveys	Istuinleveys + 23,2 cm
Istuinsyvyys, säädettävissä 2,5 cm:n välein	35,5-45,5 cm / 40,5-50,5 cm
Istuinkulmansäätö	-3° - +30°
Selkäosan kulmansäätö	87°-133°
Selkäosan korkeus	51,5 cm- säädettävissä portaattomasti max. 62,5 cm
Istuinkorkeus	41,7 cm / 44,7 cm
Kuljetuspyörät	24x1" PU-renkaat, rumpujarrupyörät
Tukipyörät	7" (175x45 mm) PU-pyörät
Säärimitan säätöväli	36-64 cm
Käsitukien korkeus istuimen pinnasta	26,5-37,5 cm
Käyttäjän maksimipaino	135 kg
Kokonaispaino (45 cm leveä tuoli)	53 kg
Törmäystestattu	ISO 7176-19 standardin mukaisesti

#### Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
NETTID30035	Comfort-pyörätuoli Netti Adapt Pro 35x35,5-45,5 cm
NETTID30038	Comfort-pyörätuoli Netti Adapt Pro 38x35,5-45,5 cm
NETTID30040	Comfort-pyörätuoli Netti Adapt Pro 40x35,5-45,5 cm
NETTID30043	Comfort-pyörätuoli Netti Adapt Pro 43x40,5-50,5 cm
NETTID30045	Comfort-pyörätuoli Netti Adapt Pro 45x40,5-50,5 cm
NETTID30050	Comfort-pyörätuoli Netti Adapt Pro 50x40,5-50,5 cm