

# Tutkimustuoli Vela Mammography



## Tutkimustuoli Vela Mammography

VE70032

VELA Mammography tutkimustuoli on potilaskäyttöön tarkoitettu tuoli. Tuoli on suunniteltu käytettäväksi erityisesti mammografiatutkimuksen aikana potilailla, joiden on pyörtymisriskin tai tuki- ja liikuntalinvaivojen vuoksi istuttava tutkimuksen aikana. Pyörätuolipotilas on helppo siirtää tutkimustuoliin kuvauksen ajaksi. Tuolin varustelu, sekä toimintavarmat säädöt ja helppo puhdistettavuus tekevät siitä erityisen hyvin sairaalaympäristöön soveltuvan ratkaisun. Tutkimustuolin 4-pyöräinen alusta ja työntökaari helpottavat potilaan liikuttelua tutkimushuoneessa, sekä tutkimusyksikössä tilasta toiseen. Potilaan jalat voidaan tukea tuolin jalkakaaren liikuttelun tai istumisen aikana. Istuimen korkeutta säädettäessä jalkakaari seuraa istuimen korkeutta. Kaikki neljä pyörää lukitseva keskuslukitus on helposti käytettävissä jalkapolkimella, ja se pitää tuolin hyvin paikoillaan tutkimuksen tai toimenpiteen aikana. Mammography tutkimustuolissa on sähkötoiminen, käsiohjaimella käytettävä korkeussäätö, jonka ansiosta sopiva istuinkorkeus on helppo säätää. Korkeussäätö lisää hoitajan ergonomiaa kuvaustilanteissa ja helpottaa potilaan seisomaan nousua siirryttäessä. Istuimen ja selkäosan kallistusmahdollisuus eteenpäin mahdollistavat vartalon asennon tuontia eteen, mikä helpottaa potilaan asemointia kuvantamis- ja tutkimuslaitteita käytettäessä. Tuolin käsituet ovat korkeussäädettävät ja taakse taittavat, jolloin tuoliin on esteetön pääsy myös sivulta. Tuolin akkuja suositellaan ladattavaksi päivittäin. Akkujen varustason osoitin sijaitsee istuimena alla, tuolin edessä.

### Valmistaja:

VELA

### Pesuhjeet

ph 6-8

des

70%

Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.

Voidaan puhdistaa desinfioidulla puhdistusaineella, (esim. 500 ppm kloramiinilla. Huom. huuhtelu!)

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

### TEKNISET TIEDOT

Istuinkorkeus, sähkötoiminen, säätö käsiohjaimella

51-81 cm

Selkäosa, malli, koko

Active L-s

Istuinosa, malli, koko

Active L-i

Käsituen pehmuste

8x26 cm

Käsituet, taakse taittavat, korkeussäätöalue

14-27 cm

Käsitukien etäisyyden säätö

38-52 cm

SWL

160 kg

Tuolin paino

40 kg

Pyörien halkaisija

100 mm

Alustan koko

55 x 55 cm

CE-merkintä

MDD 93/42/EEC

EMC-testaus

IEC 60601-1-2

IP-suojaluokka

IP21