

# Monitoimituoli Ottfried



## Monitoimituoli Ottfried

7020408-01

Ottfried Mobilizer monitoimituoli mahdollistaa potilaan varhaisen kuntoutuksen tehohoidossa tai vaativan kuntoutuksen yksikössä. Monitoimituoli soveltuu käytettäväksi myös hoitotuolina erilaisissa hoitoyksiköissä. Se mahdollistaa asennon vaihtamisen makuuasennosta istuma-asentoon, sekä potilaan avustamisen seisomaan nousun harjoittelussa, esimerkiksi yhdessä kävelypöydän kanssa. Tuolin säädöt tapahtuvat sähkötoimisesti, käsiohjaimen painikkeita painamalla. Sähkötoimiset säädöt helpottavat juuri oikean asennon löytymistä ja niiden pehmeät liikkeet antavat potilaalle turvallisen tunteen. Tuolin korkeutta säätämällä hoitohenkilöstö voi työskennellä samalla tasolla ja katsekontaktissa potilaan kanssa, tarjoten potilaalle yhteyden ympäristöönsä, säilyttäen samalla omat ergonomiset työasennot. Tuolin patentoitu pituuskompensaatiomekanismi estää keskivartaloa puristumasta kasaan, kun tasoa säädetään makuulta istuma-asentoon. Toiminnolla on painehaavaumia ennaltaehkäisevä vaikutus. Tason pehmustemateriaalina on viskoelastinen, kehon painon ja lämmön mukaan muovautuva vaahto, joka tasaa painetta kehon painepisteiden alta eri asennoissa. Potilaan jalat tukeutuvat yhtenäiselle jalkatuelle, joka voidaan kääntää siirtymisten tai seisomaannousun harjoittelun ajaksi pois tieltä pohjepehmusteen alle. Säärimita on säädettävissä potilaan pituuden mukaan sähkötoimisesti käsiohjaimella. Ottfried Mobilizer säätyy täysin makuuasentoon, mahdollistaen helpon ja turvallisen siirtymisen sängystä tason päälle ja takaisin nopean ja turvallisen paluun takaisin makuulle tai elvytysasentoon, potilaan tilan heiketessä äkisti Ottfried Mobilizer säätyy erilaisiin istuma-asentoihin, mahdollistaen Vaiheittaisen painon siirron istuinluille ja jaloille Seisomaannousun harjoittelun esimerkiksi kävelypöydän tai -telineen kanssa Orientoitumisen ympäristöön Vireystilan kohentumisen Monitoimituoli Ottfriedin hintaan sisältyvä varustus: Keskuslukittavat pyörät ja suuntalukituspyörä Ladattava akku ja latausasema, sekä vaihtoakku. Vaihtoakku mahdollistaa laitteen yhtäjaksoisen käytön. Akku on helppo vaihtaa käyttäjän toimesta. Akku sijaitsee selkäosan takana ja se irtoaa pidikkeestään kevyesti vetämällä. Pöytälevy pikakiinnityksellä Päätuoli: muotoillun päätuen korkeutta voidaan säätää helposti liu'uttamalla. Kiinnityspaikat lepositeille Lisäksi saatavana on erilaisia lisävarusteita, kuten tippateline, asennon tukityyny ja erilaisia asentoa tukevia vyöratkaisuja.

### Valmistaja:

Reha Medi Hoffmann GmbH

### Pesuohjeet

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

### TEKNISET TIEDOT

Potilaan Max. paino	250 kg
Potilaan pituussuositus	155 - 190
Istuin-/makuutason korkeus	58-80 cm

Kokonaispituus makuuasennossa	190 cm
Istuinleveys	57 cm
Pyörät (keskuslukittavat)	Ø 150 mm
Akut	24 V, 4.5 A
Takuu	2 vuotta